

Sulci-Protektoren

Zum Begradigen, Ergänzen und Formen des seitlichen Nagelrandes sowie zum Abpolstern des Nagels gegen einen gereizten oder entzündeten Nagelwall eignen sich Sulci-Protektoren ideal. Besonders beim eingewachsenen Nagel bieten sie gegenüber Tamponaden Vorteile.

Die Verweildauer beträgt bis zu 8 Wochen (Neu-Fixierung nach 4 Wochen).

Die Schienen polstern nicht nur, sondern bewirken auch, dass der Nagel am freien Rand seine breite Form behält. Das beugt Veränderungen des Nagelbettes, Aufwölbungen des Nagelwalls und daraus entstehenden Verformungen und Wachstumsstörungen des Nagels vor.

Sulci-Protektoren gibt es in 3 verschiedenen Größen. Sulci-Protektoren können mit einer Pinzette oder einem Sulci-Injektor angesetzt werden. GEHWOL Nagelmasse fixiert ideal den Protektor.



Beim eingewachsenen Nagel drückt der seitliche Nagelrand – oft mit Ecken oder Dornen – tief in den Falz, der mit schmerzhaften Entzündungen reagiert.



Zunächst gilt es, den Nagelrand zu begradigen und zu glätten – z. B. mit Hilfe einer Eckenfeile.




Die kleinen Schienen aus weichem Kunststoff sind in Längsrichtung offen. Sie werden auf die passende Länge zugeschnitten und am kurzen Rand geglättet.



Nach dem Desinfizieren und Entfetten des Nagels den Sulci-Protector mit der Pinzette über den freien seitlichen Nagelrand schieben.



Der fertig eingesetzte Sulci-Protector

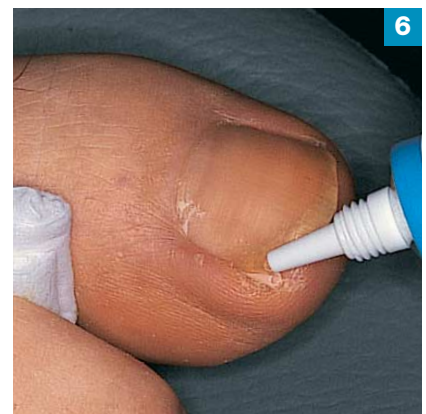

Den sichtbaren, auf der Nagelplatte liegenden Teil des Sulcis mit GEHWOL Nagelmasse fixieren.